

Miele

Til Fodterapeuter

Desinficerende opvaskemaskine

Overholder de **Nationale Infektionshygiejniske Retningslinier** fra Statens Serum Institut

Miele Professional. Immer Besser.





”Med bare én patient mere om dagen i 8 mdr. er maskinen betalt. Jeg sparer en masse tid. Maskinen vasker en gang om dagen, og jeg har 100 % rene instrumenter. Instrumenter og æsker bliver sat direkte i maskinen, og mit arbejdsbord er hele tiden ryddet. Jeg skal ikke håndtere kemikalier og kogende vand - med fare for skoldning.”

Therese Rye Jørgensen, Fodterapeut, Klinik for fodterapi, Langeskov Centret

De Nationale Infektionshygiejniske Retningslinier (NIR) fra Statens Serum Institut

HVILKE KRAV SKAL DU OVERHOLDE?

Ifølge Statens Serum Instituts Infektionshygiejniske Retningslinier (NIR), er der en række krav, du som fodterapeut skal være opmærksom på i forbindelse med rengøringen af dine instrumenter og dit værktøj.

Udpluk fra NIR:

- Dine instrumenter skal forskylles med koldt vand (under 45° C), hvorefter de skal rengøres med medicinsk godkendt rengøringsmiddel og varmt vand.

- Til sidst skal instrumenterne desinficeres med varmt vand svarende til f.eks. 90° C i 1 minut.
- Maskinen skal være medicinsk godkendt og stemplet med en CE godkendelse iht. EN ISO 15883
- Lejlighedsvis selvdesinfektion af maskinen kræver 90° C i 5 min.
- En sikker fjernelse af HPV virus kræver en holdetid på 90° C i 2 min.

KAN DIN OPVASKEMASKINE DET?



Miele

Plads til
24 sæt
instrumenter
inklusive æsker

Godkendt
Overholder
alle krav

Rengøring og
sterilisering- uden
forrengøring

Vælg den rigtige desinficerende opvaskemaskine og **vær sikker** på, at du **overholder kravene**

Miele Professional er kendt for stabilitet og ikke mindst maskiner i førsteklasses kvalitet.

Vi leverer maskiner, løsninger og service til fodterapeuter i hele landet. Vi sørger for levering, installation og løbende service, så du har en løsning, der fungerer hver dag, året rundt.


Med en desinfektionsmaskine fra Miele Professional får du en maskine som overholder alle lovkrav - og som kan dokumentere det.

Du får blandt andet:

- **Mere tid til behandling af dine patienter.** Maskinen giver dig hurtigt og nemt rene instrumenter klar til sterilisation uden forrengøring.
- **God kapacitet,** så du ikke skal vaske op hele tiden. Der er plads til hele 24 sæt instrumenter inklusive æsker pr. vask.

- **Patient- og personalesikkerhed helt i top.** Her får du dokumentation for, at du overholder retningslinjerne i NIR.
- **Lave driftsomkostninger** og billigst på den lange bane. Her får du en førsteklasses kvalitetsmaskine med en lang levetid, som er billig i drift.
- **En medicinsk godkendt maskine,** som overholder alle punkter i EN ISO 15 883 vedrørende krav til produktion, test, sikkerhed, skylletemperatur og temperaturholdetid i forhold til de strenge krav. Godkendelse fremgår af CE-mærkningen på maskinen, efterfulgt af et registreringsnummer på den myndighed, der har godkendt registreringen.

Vi validerer maskinen på installationsadressen, så den med sikkerhed lever op til kravene i NIR.



”Med desinfektionsmaskinen fra Miele sparer jeg tid på rengøring af mine instrumenter, samtidig med at jeg overholder reglerne i NIR og passer bedre på miljøet end ved brug af henstandsvæsken”.

*Bettina Kristensen, Fodterapeut,
Klinik for fodterapi, Hvidovrevej*

Forbrugsstoffer/sæbe

3,90 kr.

pr. vask.

Miele Professional

Billigst på den lange bane

Få frigjort tid, så du kan behandle flere kunder

I en travl hverdag med mange opgave er det vigtigt hele tiden at være opmærksom på tiltag, som kan frigøre tid, uden at det går ud over den kvalitet, som du gerne vil yde over for dine kunder.

Her er en desinfektionsmaskine fra Miele Professional en mulighed, hvor du kan spare al den tid, som du i dag bruger på at rengøre dine instrumenter samtidig med, at du får en høj ensartet vaske kvalitet, hver gang du sætter maskinen i gang.

En patient om ugen kan finansiere opvaskemaskinen

Få en specifik udregning hos enten Miele eller din forhandler, så du ved, hvad det vil koste for dig.

Brug mindre energi, vand og sæbe

En desinfektionsmaskine fra Miele Professional har en lang levetid, få driftsstop og et lavt energi-, vand- og sæbeforbrug.



Vælg den rigtige maskine En gennemtænkt løsning til fodterapeuter

Helt enkelt; en desinfektionsmaskine og det rigtige tilbehør og kemi

Det er helt enkelt; vælg først en kvalitets desinfektionsmaskine fra Miele Professional - og herefter det tilbehør som passer præcis til dit behov, så får du en helt unik sikker og effektiv rengøring af dine instrumenter, og - med det rigtige tilbehør - kan det foregå nemmere og hurtigere.

Vi anbefaler en Miele Professional PG 8582, som sikrer dig:

- **Sikkerhed med kontrol.** Højtudviklede sensorer i maskinen kontrollerer vaskequaliteten og giver dig straks besked, ved afvigelser.
- **Hygiejnisk opvaskebeholder.** Maskinen er selv-desinficerende. Du undgår aflejring af snavs og blod, og hygiejnen er i top.
- **Overvågning af spulearme.** Spulearmene er udviklet til at fremme opløsningen af tilsmudsninger for et optimalt rengøringsresultat med et mindre vandforbrug samt overvågning til korrekt rotation.
- **Betjeningskomfort.** Betjeningen er intuitiv og foregår nemt på dørgrebet på maskinen.
- **God ergonomi.** Med saltpåfyldning i døren undgår du at bukke dig, og døren lukker du nemt ved et let tryk.
- **Højeffektiv tørring.** Med EcoDry, hvor døren automatisk åbner efter endt vask, samt dampkondensator, der medvirker til en god tørring af dine instrumenter.

Miele
anbefaler

Unik og sikker rengøring af
dine instrumenter.
Nemmere og hurtigere.




FAKTA

PG 8582 Rengørings- og desinfektionsmaskine

- Medicinsk godkendt i henhold til EN ISO 15883 og stemplet med en CE godkendelse af et bemyndiget organ
- Fritstående og til underbygning
- Hvid eller i rustfrit stål
- Bredde/højde/dybde: 600/835/600 mm - højde 820 mm til underbygning
- AutoClose og automatisk dørlås
- Maks. efterskylstemperatur 93 °C
- Testede driftstimer 15.000
- Spuletryk- og spulearmovervågning
- Cirkulationspumpe med variabelt tryk op til 450 l/min for optimalt vaskeresultat
- Eltilslutning: 3N AC 400V 50 Hz
- Koldvands- og varmvandstilslutning 3/4"
- Interface til procesdokumentation fremtidssikrer maskinen

Miele

97% af alle eksisterende kunder vil købe en maskine fra Miele Professional igen*

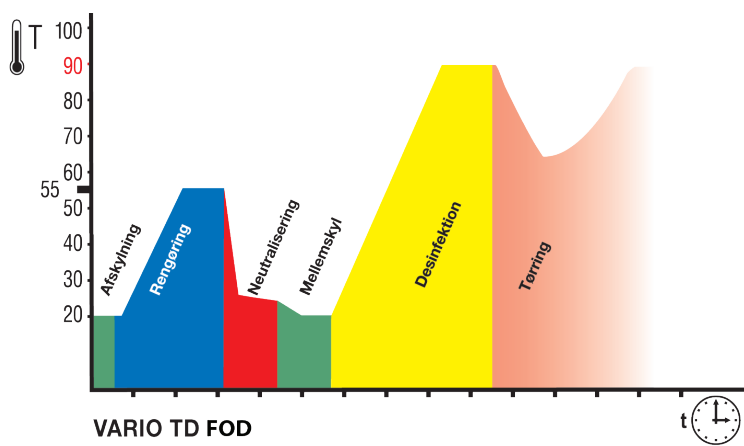

Specielt til fodterapeuter

Vario TD Fod-programmet er specielt velegnet til fodterapeuter og rengøring iht. EN ISO 15883 til alle termostabile instrumenter til maskinel genanvendelse.

Programmet starter med en afkøling ved lav temperatur, så proteinrester ikke denaturerer. Efter afkølingen og en intensiv rengøringsfase følger neutraliseringsfasen, som fjerner sæberester og sikrer, at instrumenterne holder sig pæne. Herefter sker den termiske desinfektion ved $>93^{\circ}\text{C}$ med en holdetid på 5 min. efterfulgt af tørring.

Hele forløbet tager 48 minutter inklusive tørringen. Maskinen regenererer efter hver 6. vask ved en vandhårdhed på 19°C dH .

* Rundspørge fra det uafhængige institut "Mercuri International".

2

Vælg det rigtige tilbehør

Konfigurer din desinfektionsmaskine til dit behov som fodterapeut

For at få mest muligt ud af din desinfektor er det vigtigt, at du får en tilbehørspakke, som giver dig den størst mulige kapacitet i hverdagen. Det er mest effektivt og er med til at gøre brugen af maskinen billigst på den lange bane.


Miele Professional har et bredt sortiment af over- og underkurve samt indsatser til forskellige typer instrumenter. Følgende kurve og indsatser er de mest almindelige. Har du andre behov, så kontakt os.

Kurve

A102

Overkurv til optimal anbringelse af indsatser


- Fyldningshøjde 205 +/- 30 mm, -bredde 475 mm, -dybde 443 mm
- Med indbygget spulearm

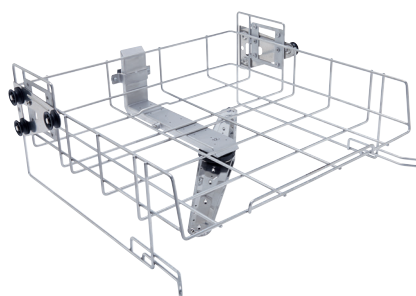

A151

Underkurv til optimal anbringelse af indsatser

- Fyldningshøjde i kombination med A102, højde 225 +/- 30 mm
- Fyldningsbredde: 490 mm, dybde: 435 mm

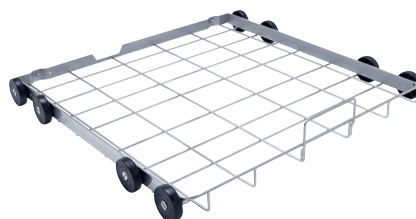

Vores anbefaling til en tilbehørspakke

- 1x A102 - Overkurv til optimal anbringelse af indsatser
- 1x A151 - Underkurv til optimal anbringelse af indsatser
- 2x DK21 - Indsats til kassetter og instrumenttæsker
- 1x DK01 - Indsats til stående instrumenter
- 2x E521/2 - Indsats til optimal anbringelse af tænger
- 1x E363 - Indsats egnet til fræsere og diverse smådele

Miele
anbefaler

Indsatser

E379

Indsats til anbringelse af diverse løse instrumenter

- 0,8 mm trådflet, 1,7 mm maskebredde, 5 mm ramme hele vejen rundt
- Udstyret med to håndtag
- Kan indsættes i over- og underkurv
- H: 80 x B: 170 x D: 440 mm



DK21

Indsats til kassetter og instrumenttæsker

- Kan indeholde 24 instrumenttæsker inkl. bund og låg
- Passer til instrumenttæsker med målene 17x7x3 cm
- H: 120 x B: 235 x D: 435 mm



E473/2

Si med låg, egnet til fræsere og diverse smådele

- Til ophængning
- Med nem lukning af låg
- H: 65 x B: 65 x D: 75 mm



E521/2

Indsats til optimal anbringelse af tænger


- Rumstørrelse: 21 x 80 mm
- 7 rum
- H: 135 x B: 100 x D: 189 mm



DK01

Indsats til stående instrumenter

- Rustfrit stål
- 54 rum (16x16 mm)
- H: 105 x B: 115 x D: 165 mm

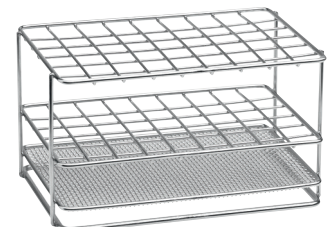

E363

Indsats egnet til fræsere og diverse smådele

- Maskebredde 1 mm
- Med låg
- Kan indsættes i over- og underkurv
- H: 50 x B: 150 x D: 220 mm





3

Vælg medicinsk godkendt kemi

For at opnå det optimale vaskeresultat spiller den kemi, som du anvender sammen med din desinfektionsmaskine, en stor og vigtig rolle. På baggrund af utallige tests og vores store viden inden for dette område har vi udvalgt nogle effektive produkter, der er skånsomme mod dine instrumenter.

- Neodischer Mediclean Forte – flydende sæbe – effektiv med enzymer, 5 l
- Neodischer Z, Neutraliseringsvæske, 5 l
- Mielclear, afspændingsmiddel, 1 l
- ProCare salt, 6x1 kg



Miele
anbefaler



Miele

Over 70 serviceteknikere, 24 måneders garanti og 15 års garanti for at du kan få reservedele. Det er en del af din sikkerhed.

Din garanti

Du får 24 måneders garanti, når du køber maskinen, og derudover garanterer vi, at du i 15 år herefter kan få reservedele til maskinen.

Hvis uheldet er ude...

Hvis din desinfektor en dag ikke virker, så er Miele Professional Service altid tæt på dig. Over 70 lokalt boende serviceteknikere dækker hele landet – så ventetiden er kort, hvis du har brug for hjælp.

En serviceaftale er din sikkerhed

Hos Miele Professional har du mulighed for at tegne en serviceaftale. Vi har flere produkter at vælge imellem - og som noget helt unikt tilbyder Miele validering af din maskine, så du har dokumentation for, at du fortsat overholder reglerne også efter flere års brug.

Miele Professional tilbyder følgende serviceaftaler:

- Eftersyn med dokumenteret temperaturkontrol – 1 årligt eftersyn. Gennemgang af maskinens funktioner samt dokumenteret temperaturmåling i henhold til EN ISO 15 883.
- Service – gælder som en forlængelse af din 2 års garanti, så du undgår uforudsete udgifter
- Kombineret service og eftersyn med dokumenteret temperaturkontrol – 1 årligt eftersyn. Denne aftale er en kombination af de to ovenstående aftaler.

Alle har råd til en Miele

Du behøver ikke gå på kompromis med dine drømme.

Drømmen om en ny desinfektor fra Miele Professional er inden for rækkevidde. Vælg selv hvordan den skal finansieres.

1. Kontant - du kan vælge at betale den nye desinfektor kontant
2. Leasing - du kan vælge at lease den nye desinfektor. Her betaler du en fast månedlig ydelse.

Tal med din forhandler, og find frem til den rette finansieringsløsning for dig.

BEMÆRK: For at du kan få en hurtig og nem installation, skal følgende tekniske installationer være på plads:

- EL: 400V 3x16 AMP
- Koldt vand: ¾" tilslutning
- Afløb: Maks. 1,0 m over maskinens bund
- Plads: Maskinen kræver min. følgende plads: H:82 cm, B:60 cm, D:60 cm



Ring til os og få professionel rådgivning

Hvis du er interesseret i mere vejledning og information om en løsning til din klinik, så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 4327 1510 – tryk 1, eller sende en mail til: professional@miele.dk

Miele Professional
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Telefon 43 27 15 10
Man-tors.: 08.00 - 16.00
Fre.: 08.00 - 15.30
E-mail: professional@miele.dk

www.miele-professional.dk